

即時檢測・高效防疫： 非洲豬瘟20分鐘掌握疫情



非洲豬瘟定溫核酸檢測試劑組

內含陽性對照組與陰性對照組



- ✓ 超快速: 反應時間只需**20**分鐘比傳統qPCR快**3~5**倍
- ✓ 超準確: 靈敏度高達**10**copies/ul ; 特異性佳
- ✓ 適合多種情境: 可搭定溫水浴槽, 攜帶型溫控裝置, ABI Quant Studio 3
- ✓ 適合多種樣品: 活體動物或是加工肉品皆可檢測

原理說明：本產品為使用即時定溫核酸增幅法及定溫圈環型核酸增幅法(LAMP)，從檢體中DNA進行增幅，可在20分鐘即獲得檢測結果。

萃取到檢測結果30分鐘快速搞定懶人包!

推薦搭配 **UniversAll Tissue Extraction Buffer**。只要**10**分鐘即完成樣品核酸萃取

LYU003



① 樣品萃取

加入 UniversAll Tissue Extraction Buffer 於 95 度加熱 10 分鐘中萃取 DNA

② 樣品準備

2ul Sample
1ul Enzyme Mix
7ul P mix
均勻混和

③ 定溫反應 20 分鐘

或 q-PCR 機器設定
(63 度 / 60 sec / 20 Cycles)



產品訂購
資訊

品名	品號	包裝
ASFV Rapid Isothermal Nucleic Acid Detection Kit 非洲豬瘟定溫核酸檢測試劑	ASFV-001	50RXN
UniversAll Tissue Extraction Buffer 10分鐘快速核酸萃取試劑	LYU003	20ml

DM11410004



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699
◆新竹 TEL:(03)658-0508
◆台中 TEL:(04)2355-2008
◆嘉義 TEL:(05)277-2262

FAX:(02)2600-0799
FAX:(03)658-0509
FAX:(04)2355-2006
FAX:(05)277-2263

◆台南 TEL:(06)249-5488
◆高雄 TEL:(07)374-8686
◆花蓮 TEL:(03)836-0065
FAX:(06)249-5499
FAX:(07)374-8585
FAX:(03)836-0075
www.uni-onward.com.tw

